

Retrouvez toutes les consignes de prélèvements sur : www.bioptima.fr


Préparation avant le prélèvement

Pour le préleveur :

Port d'Équipement de Protection Individuel (EPI)
recommandé : masque, gants à usage unique

Matériel :

- Ecouvillon stérile à tige souple (bouchon orange)
- Milieu de transport pour virus (bouchon rouge)

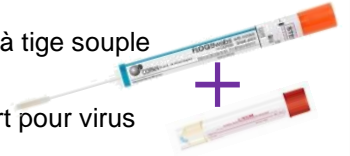


Procéder au prélèvement par écouvillonnage nasal



RESPECTER CES CONSIGNES ET LE LIEU DE PRELEVEMENT

- ✓ Eliminer les mucosités par mouchage
- ✓ Placer le patient en position assise
- ✓ Maintenir la tête du patient légèrement inclinée vers l'arrière
- ✓ Introduire l'écouvillon dans une narine de façon horizontale, le pousser délicatement le plus loin possible en suivant le plancher de la fosse nasale, jusqu'à atteindre le nasopharynx (5 à 7 cm environ chez l'adulte)
- ✓ Faire 2 rotations de l'écouvillon afin de collecter un maximum de cellules épithéliales
- ✓ Retirer lentement l'écouvillon

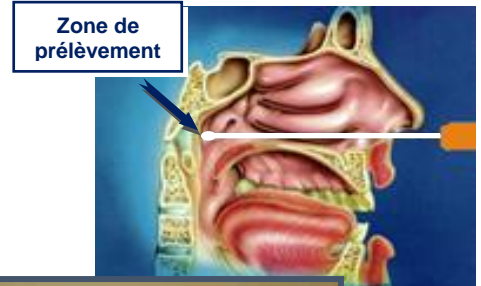

Préparer le prélèvement



- ✓ Placer **RAPIDEMENT** l'écouvillon dans le tube avec le milieu de transport à bouchon rouge. Ne pas vider le liquide de conservation
- ✓ Couper l'écouvillon environ 1 cm en dessous de la marque rouge
- ✓ Revisser le bouchon sur le tube
- ✓ Identifier l'échantillon avec le nom, nom de naissance, prénom et date de naissance
- ✓ Placer l'échantillon dans le sachet fermé hermétiquement
- ✓ Acheminer au laboratoire dans les **12 heures à température ambiante (15 - 25°C)**.

Remplir la fiche de suivi du prélèvement et renseignements cliniques C1-ENR-040-V2

◆ PATIENT

Nom : Prénom :
 Nom de naissance :
 Date de naissance : Sexe : F H
 Adresse : Téléphone :

Etiquette GED
 Réservé au laboratoire

◆ RESULTATS

- Au laboratoire
 Par internet (n° de portable obligatoire)
 A la pharmacie :

◆ PRELEVEMENT

Nom du préleveur : Date du prélèvement : Heure de prélèvement :

◆ RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Fièvre : OUI NON
 Toux : OUI NON
 Douleurs musculaires : OUI NON

◆ POUR LE LABORATOIRE : Conforme Non-conforme

