



# BIOPTIMA

## C1-ENR-039 Prélèvements bactériologiques divers - préconisations V2

Date de mise en application : 13/02/2020

### PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES

(Gorge, Peau, Plaie, Ecoulement purulent...)

Retrouvez toutes les consignes de prélèvement sur [www.bioptima.fr](http://www.bioptima.fr)



Pour recherche de germes "banaux"

**1 écouvillon TRANSWAB**  
(milieu liquide, bouchon violet)

Casser la tige dans le tube au niveau de la marque.  
Ne pas vider le liquide de conservation

**Identifier les échantillons**  
**(Nom, nom de naissance, prénom, date de naissance)**

Placer le tube dans le sachet avec cette fiche et la prescription

Délai d'acheminement au laboratoire  
**12 heures (entre 15 - 25°C)**

#### PATIENT :

Nom : ..... Prénom : .....  
Nom de naissance : ..... Date de naissance : .....  
Adresse : ..... Téléphone : .....

#### RESULTATS :

au laboratoire     par la poste     à la pharmacie de.....  
 par internet (n° de téléphone portable indispensable) .....

**PRELEVEMENT :** Site anatomique de prélèvement : .....

Préleveur : .....  
Date du prélèvement : ..... Heure du prélèvement : .....

#### RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

##### Antibiothérapie :

Prise récente d'antibiotiques ?     oui     non  
Si oui, Nom de l'antibiotique : ..... En cours depuis ..... Arrêté depuis .....

**Renseignements cliniques :** (taille, aspect de la lésion, date d'apparition...)

Traitement antibiotique à débiter après le prélèvement :  oui     non  
Si oui, Nom de l'antibiotique : .....

Réservé au laboratoire :  conforme     non conforme .....