



(Gorge, Peau, Plaie, Ecoulement purulent...)

Retrouvez toutes les consignes de prélèvement sur www.bioptima.fr



Pour recherche de germes "banaux"

1 écouvillon TRANSWAB
(milieu liquide, bouchon violet)

Casser la tige dans le tube au niveau
de la marque.
Ne pas vider le liquide de conservation

Identifier les échantillons
(Nom, nom de naissance,
prénom, date de naissance)

Placer le tube dans le sachet avec
cette fiche et la prescription

Délai d'acheminement au
laboratoire
12 heures (entre 15 - 25°C)

PATIENT :

Nom : Prénom :
Nom de naissance : Date de naissance :
Adresse : Téléphone :

RESULTATS :

- au laboratoire par la poste à la pharmacie de.....
 par internet (n° de téléphone portable indispensable)

PRELEVEMENT : Site anatomique de prélèvement :

Préleveur :

Date du prélèvement : Heure du prélèvement :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

Antibiothérapie :

Prise récente d'antibiotiques ? oui non

Si oui, Nom de l'antibiotique : En cours depuis Arrêté depuis

Renseignements cliniques : (taille, aspect de la lésion, date d'apparition...)

.....
.....

Traitement antibiotique à débiter après le prélèvement : oui non

Si oui, Nom de l'antibiotique :

Réservé au laboratoire : conforme non conforme