




Retrouvez toutes les consignes de prélèvements sur : www.bioptima.fr



Le prélèvement doit être réalisé plus de 30 minutes après la dernière prise de boisson, d'aliment, de chewing-gum, de cigarette / e-cigarette, d'un brossage des dents ou d'un rinçage bucco-dentaire.

Procéder au recueil de salive

1 Cracher dans le pot jusqu'à ce que la quantité de liquide (et non pas des bulles) atteigne le niveau indiqué sur l'image (flèche rouge). Le crachat doit impérativement être fait sans effort de toux, ni de raclement de gorge. Il est recommandé de recueillir le liquide salivaire après avoir « salivé » plusieurs fois pendant 30 secondes dans la bouche pour générer un certain volume. Le crachat peut être réalisé à n'importe quel moment de la journée.

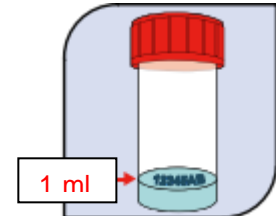

2 Fermer hermétiquement le bouchon rouge.

3 L'échantillon prélevé doit être placé dans le sachet.

Renseigner les informations Patient

4 Renseigner le **Nom** du patient, son **Prénom** et sa **date de naissance**, sur l'étiquette blanche prévue à cet effet. Utiliser de préférence un feutre indélébile.

5 Acheminer rapidement au laboratoire (**température ambiante** si délai d'acheminement < 5 heures) ou conserver à **température réfrigérée** (entre +2°C et +4°C) si délai d'acheminement > 5 heures.

Remplir la fiche de suivi du prélèvement et renseignements cliniques

◆ PATIENT

Date de prélèvement :

Nom : Prénom :

Nom de naissance : **Portable** :

Date de naissance : Résultat : internet auprès du MT

Adresse :

N° de SS :

GED - Zone labo

Médecin traitant :

◆ RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES

Contact SECU Oui Non

Lieux de résidence : EPHAD Hospitalisé Hébergement individuel autre collectif

Prof. de santé : Oui Non

Symptômes le jour ou la veille 2,3 ou 4j 5,6 ou 7j 8 à 14j
 15j à 28j > à 4 semaines Asymptomatique

Préop Oui date :

Retour voyage à l'étranger dans les 15 derniers jours Non Oui Pays :

◆ LABO : conforme non conforme